

Informação do Produto

Termómetro de Axila c/ Voz Portuguesa

ISO 09 48 03 | Taxa 23% IVA | Termómetro de axila digital com ecrã de grande dimensão e voz em português.

Referência: 2203090



Os termómetros digitais são disponibilizados com o intuito de medir e monitorizar a temperatura do corpo humano seja por médicos ou por consumidores comuns num hospital ou em casa.

- Voz em Português
- Leitura em 8 seg.
- Ponta Flexível
- Grande ecrã de 1,4"
- Caracters ampliados e retroiluminados
- Apresenta o ultimo valor medido

O que é uma temperatura normal?

Apesar de a temperatura "normal" aceite seja 37.0°C/98.6°F, as leituras de temperatura podem variar entre 36.1°C/97.0°F a 37.2°C/99.0°F e serem consideradas normais. As variações da temperatura podem ser atribuídas a atividades tais como exercícios, fumar, comer ou beber. A sua temperatura é mais baixa de manhã do que a tarde. Outras variações podem ser causadas dependendo da localização onde são efetuadas. Enquanto a temperatura oral segue os âmbitos do que foi falado anteriormente, a temperatura rectal é geralmente 0.5°C/1.0°F mais alta. Uma medição axilar (debaixo do braço) terá uma temperatura 0.5°C/1.0°F mais baixa.

Como medir a temperatura.

- Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar. O termómetro emite um sinal sonoro, e mostrará o ecrã azul com luz.
- Aparecerá então a última temperatura medida. Ouvirá “Faça a medição” após 2 segundos o termómetro fará uma rotina de verificação e mostrará "ERR" se encontrar algum problema. Ao mesmo tempo dirá “Erro! Repita a medição”, após 60 segundos o termómetro desliga-se automaticamente.
- Se na rotina de verificação não houver erros o termómetro mostrará “Lo°C” e começará a medição, um sinal sonoro ocorrerá quando a medição terminar em 8-10 segundos, ouvirá então o resultado falado e a temperatura será mostrada no ecrã.
- Se pretender iniciar outra medição, desligue o termómetro e ligue-o novamente. O termómetro desliga-se após 60 segundos de inatividade. Ou pressione o botão LIGAR/DESLIGAR.

Como configurar o termómetro:

- **Ligar ou Desligar a voz:** Quando o termómetro está desligado pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 4 segundos e alterne entre ON e OFF para LIGAR ou DESLIGAR a voz.
- **Selecionar Idioma:** Quando o termómetro está desligado pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 8 segundos até aparecer “01” solte o botão, e pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para alternar entre “0T”, “05”, “06”. Os códigos correspondentes seguem como referencia:

1. Código: 01 - Idioma Português
2. Código: 02 - Idioma Inglês
3. Código: 03 - Idioma Espanhol
4. Código: 04 - Idioma Francês
5. Código: 05 - Idioma Italiano
6. Código: 06 - Idioma Alemão

- **Seleção de °C e °F:** Quando o termómetro está desligado pressione o botão de LIGAR/DESLIGAR por 12 segundos até aparecer "C" ou "F" no ecrã e solte o botão, e pressione novamente o botão LIGAR/DESLIGAR para alternar entre "C" e "F". O termómetro entra no modo escolhido automaticamente depois de reiniciado.
- **Substituir as pilhas:** As pilhas do seu termómetro necessitarão de ser substituídas quando o símbolo aparecer no canto inferior direito do ecrã. Substitua as 3 pilhas com pilhas AG13 de 1.5V ou equivalentes.

Para substituir as pilhas:

- Abra a tampa das pilhas
- Remova as pilhas
- Insira as novas pilhas com o lado positivo(+) virado para cima.
- Feche a tampa das pilhas.

AVISO: Substitua as pilhas convenientemente e mantenha as pilhas afastadas de crianças e do calor.

Instruções de limpeza:

- Limpe o termómetro com um pano macio
- Não lave com água ou detergente que contenha propriedades abrasivas.
- Não esterilize fervendo ou utilizando vapor.

Precauções:

- O termómetro deverá ser utilizado sob a supervisão de um adulto. Não é um brinquedo para crianças.
- Não corra, fale ou ande durante a medição.

- Guarde o termómetro num local seco e longe de sítios húmidos. Evite temperaturas extremas.
- Largar ou sujeitar o termómetro a choques grandes deverá ser evitado
- Não tente desmontar o termómetro, exceto para substituir as pilhas.

+ Informação

Tipo de Dispositivo: Termómetro Axilar

Energia: Pilhas 3 x AG13

Classificação do Produto (ISO): ISO 09 48 03

Código ISO | Categorias: (09) Produtos de apoio para cuidados pessoais e proteção | (48) Produtos de apoio para medição das propriedades físicas e fisiológicas humanas | (03) Termómetros corporais

IVA: Taxa normal 23% IVA Incluída

Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.

